

## DEZINFEKČNÍ PLÁN PRO ZUBNÍ AMBULANCE

|   | CO   | KDY?  | JAKO?  | ČÍM?  | KONCENTRACE   | POUŽITÍ/<br>DÁVKOVÁNÍ  | EXPOZICE  | ÚČINNOST   |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|
| Ruce  | umývání rukou  | po použití toalety, před a po jídle, před příchodem na pracoviště, při viditelném znečištění rukou    | vodou a umývací emulzí   | MANISOFT  | neředí se   | 3 - 5 ml   | umývání rukou                                       |  |
|   | regenerace a ochrana rukou a pokožky   | podle potřeby   | vetřít do pokožky  | SILONDA   | neředí se   | podle potřeby  | regenerační krém                                    |  |
|   | dezinfekce rukou a pokožky   | před a po výkoně<br><br>před zákrokem   | hygienická dezinfekce rukou: na suché ruce aplikovat 3 ml přípravku, případně opakovat, aby byly ruce vlhké po celých 30 s<br><br>chirurgická dezinfekce rukou: po lokte umýt vodou a mycí emulzí, nechty, klouby, záhyby, řádně opláchnout a vysušit, aplikovat 10 - 15 ml přípravku, případně opakovat, aby byly ruce vlhké po dobu celé doby expozice | SKINMAN SOFT PROTECT  | neředí se<br><br>neředí se  | 3 ml<br><br>ruce musí být vlhké po celou dobu expozice, dávkovat v potřebném množství  | 30 s<br><br>90 s                                    | ABTM(V)<br><br>ABTM(V)   |
| Kůže  | pokožka  | před vpichy, punkcemi, odstraněním stěhů a dezinfekce operačního pole                                 | dokonale smáčet tamponem nebo postříkat, nechat zaschnout  | SKINSEPT F<br>SKINSEPT G  | neředí se   | podle potřeby  | 30 s  | A(B)(V)  |
| Dutina ústní  | hygienu ústní dutiny   | před chirurgickými zákroky  | ústnu dutinu vypláchnout s 10 - 15 ml roztoku  | SKINSEPT MUCOSA   | neředí se   | podle potřeby  | 60 s  | A(B)(V)  |
| Nástroje a pomůcky  | Dezinfekční a čistící přípravek k okamžitému použití k ošetření nástrojů, rotačních nástrojů a kanálkových nástrojů před sterilizací | po použití  | Nástroje zcela ponořte do roztoku, zakryjte je a nechte působit. Dodržujte minimální dobu expozice, tzn. 5 min (A). Vyměňte nástroje z roztoku. Vyčištěné nástroje opláchněte velkým množstvím plné vody, aby se odstranily všechny stopy přípravku a organických nečistot. Nástroje důkladně osušte a připravte na sterilizaci.                         | DENTASEPT SPECIAL ROTATIV   | neředí se   | podle potřeby tak, aby byly nástroje překryty  | 15 min  | A(B)   |
|   | Dezinfekční a čistící prostředek pro stomatologické instrumentarium před sterilizací   | po použití  | Nástroje zcela ponořte do pracovního roztoku, zakryjte víkem a nechte působit. Viditelné nečistoty očistěte kartáčkem. Pro odstranění velkých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.   | DENTASEPT TRI ENZYMATIC   | 0,5%  | 0,5ml/l  | 7min  | A(B)(V)  |
|   | instrumentarium, pomůcky z kovu, skla, nerez, plastu   | po použití  | předčistění a dezinfekce: zcela ponořit do připraveného roztoku, nástroje rozevířít, po vyjmání dočistit, opláchnout pitnou vodou, sterilizovat  | ANIOSYME XL3<br>SEKUSEPT AKTIV  | 0,5%<br>1%  | 0,5ml/l<br>10g /l  | 15 min<br>10 min                                    | A(B)(V)<br>A(B)(V)   |
|   | vyšší stupeň dezinfekce, termolabilní instrumenty  | po použití  | vyšší stupeň dezinfekce: po předčistění resp. dezinfekci (viz výše) ponořit do dezinfekčního roztoku, po expozici oplach sterilní vodou  | ANIOXYDE 1000 LD<br>SEKUSEPT AKTIV  | koncentrovaný, nutnost používat testovací průšky<br>2%                                | 5 min<br>20g/l   | (až 14 dní použit)<br>30 min                        | ABCTMV<br>ABCTMV   |
|   | renovace nástrojů z oceli, odstraňuje usazeniny vzniklé po oxidaci   | podle potřeby   | ponořte nástroje do roztoku ředěného vlažnou vodou. Nechte působit 1 hodinu. Opatrně opláchněte a osušte. Roztok vyměňte minimálně jednou za změnu.  | ANIOS R444  | 0,5% - 5%   | 5 - 50 ml na 3l vody   | 60 - 120 min  | renovace   |
|   | odsávací systém, odlučovače amalgámu   | na konci každého ordinacího dne připravte do systému ASP 40ml koncentrátu a doplňte nádobu do 2l vody | připravený roztok v ASP nasajte do odsávacího systému a nechte působit minimálně 15 minut, roztok může zůstat v systému celou noc. Potom naplňte systém ASP min. 1l čisté vody a systém propíchněte  | DENTASEPT ASPIRATION AF+  | 2%  | 20ml/l   | 15 min<br>60 min                                    | A(B)<br>A(B)   |
|   | Plochy   | podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, křesla, transportní vozíky, nádoby na odpad a jiné povrchy  | vyšetřovny, ambulance 1 x denně  | připraveným pracovním roztokem vytřít na mokro nebo umýt a nechat zaschnout   | SURFANIOS PREMIUM<br>INCIDIN PRO  | 0.25%<br>0.50%   | 2,5ml/l<br>5ml/l                                    | 15 min<br>30 min   |
| antireziduální mytí   |  | při střídání dezinfekčních přípravků také pro odstranění nálepu, 1 x týdně resp. dle potřeby          | připraveným pracovním roztokem vytřít na mokro nebo umýt a nechat zaschnout  | IMI ORANGE  | 0.50%   | 5ml/l  |   | čistící produkt  |
| instrumentární stoly, přístroje, křesla, lehátka, klíky a dveře v okolí klíky, vypínače |  | minimálně 1 x denně, respektive dle potřeby   | rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, rozetřít jednorázovou utěrkou<br><br>důkladně otřít utěrkou a nechat zaschnout  | DENTASEPT SPRAY 60<br>INCIDIN OxyFoam 5 (na citlivé materiály)<br>INCIDIN ALCOHOL WIPES<br>INCIDIN OxyWipe 5 (na citlivé materiály) | neředí se<br>neředí se<br>ubrousily<br>ubrousily                                      | ošetřovaná plocha musí zůstat mokrá<br>ošetřovaná plocha musí zůstat mokrá<br>ošetřovaná plocha musí zůstat mokrá<br>ošetřovaná plocha musí zůstat mokrá | 30 s<br>1 min<br>30 min<br>1 min<br>2 min<br>60 min | A(B)<br>A(B)(V)<br>ABTMV + C.Diff<br>A(B)(V)<br>A(B)(V)<br>ABTMV |
| toaleta   |  | toaleta, sifóny 1x denně  | koncentrát nanést po obvodu celé mísy toalety z vnitřní strany, nechat působit a následně řádně umýt   | DIESIN MAXX   | dle potřeby na WC a kachličky, sanita a vodovodní baterie, ředění od 10% - koncentrát |  | 10 min  | A  |
| sifóny  |  |   | 1l 1,00% roztoku vylít do sifonu   | ANIOS OXY FLOOR   | 1%  | 1l roztoku vylít do výlevky  | při posledním dením úklidu (15 min, umyvadlo)       | ABTM(V)  |
| Omněš   |  | EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÁ SITUACE   | velké a malé plochy  | pracovním roztokem vytřít na mokro nebo umýt a nechat zaschnout   | ANIOS OXY FLOOR   | 1%<br>2%   | 5g/l<br>10g/l                                       | 15 min<br>60 min   |
|   |  |   |  | MEDICARINE  | 1 tbl   | 5 tbl / 1,50l vody<br>10 tbl / 3,50l vody  | 15 min  | ABTM(V)<br>ABCTMV  |

Výpočetlivy  
A - sennecení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinových hub  
B - jiné virové účinnosti  
(B) - účinnost proti obaleným virům / omezené spektrum virové účinnosti  
C - nabitost bakteriálních spór  
T - tuberkulocidní účinnosti  
M - mykobaktericidní účinnosti  
V - fungicidní účinnosti

Pro oxidaci a dezinfekci povrchů vodu 20 - 25°C.  
Do dezinfekčních prostředků nepřidávat žádné detergenty, saponidy apod.  
**ECOLAB**  
PROTECTING WHAT'S VITAL